

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego 
REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®,
żel z mentolem, 75 g

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem

Uwagi:

- Instrukcję stosowania REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem należy traktować jako część wyrobu medycznego.
- Niniejsza instrukcja stosowania powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem.

Opis wyrobu medycznego / wskazania do stosowania:

Wyrób medyczny REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem przeznaczony jest do leczenia łagodzenia bólu stawów, szczególnie przy zmianach zwyrodnieniowych i bólach mięśni, także po nadmiernym wysiłku fizycznym.

Wyrób medyczny REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem jest przeznaczony dla szerokiego grona użytkowników, bez żadnych specjalnych ograniczeń co do długości stosowania.

Opis mechanizmu działania REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem, właściwości pod względem skuteczności i oczekiwanych korzyści klinicznych:

Wyrób medyczny REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem posiada odpowiednie właściwości poślizgowe ze względu na swoją lepkość i gęstość. Te parametry zapewniają optymalne przenoszenie sił podczas masażu i zapewniają jego wysoką skuteczność. W rezultacie następuje redukcja bólu. Lepkość

i gęstość wyrobu medycznego REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem są odpowiednio dobrane do rodzaju, obszaru i minimalnego czasu masażu bolącego miejsca. Masaż należy wykonywać, aż do pojawienia się pierwszych oznak wchłaniania i zaniku żelu. Masaż wyrobem medycznym REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem poprawia ukrwienie masowanej okolicy i zmniejsza napięcie mięśni, co z kolei zmniejsza ból mięśni i stawów oraz ich otoczenia. Efekt terapeutyczny REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem zapewniają jego właściwości fizyczne. Główne składniki żelu to: woda, alkohol, mentol, olej rycynowy i substancje żelujące. Jego unikalny skład chemiczny decyduje o lepkości i gęstości żelu, a tym samym zapewnia wystarczający poślizg podczas masażu. Zawartość mentolu zapewnia również dodatkowy efekt w postaci przyjemnego i relaksującego zapachu.

Sposób użycia:

Żel przeznaczony jest do użytku zewnętrznego. W razie potrzeby nanieść odpowiednią ilość żelu na dłoń, w zależności od wielkości masowanej powierzchni. Masaż należy wykonywać kilka razy dziennie do pierwszych oznak wchłaniania żelu. Masaż najlepiej jest wykonywać naprzemiennie ruchami okrężnymi i posuwistozwrotnymi. Po ustąpieniu objawów żel można stosować jeszcze przez kilka dni.

UWAGA: stosowanie wyrobu medycznego REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem chroni skórę przed otarciami i innymi uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas masażu bez użycia środka poślizgowego.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia:

- Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku jakichkolwiek komplikacji należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na błony śluzowe i do oczu.
- Nie używać, jeśli plomba na tubie jest uszkodzona.
- Podczas stosowania REUMO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z mentolem nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych, takich jak: uczulenia, zwiększenie bolesności, itp. Lekkie podrażnienie skóry (swędzenie) u osób nadwrażliwych nie jest przeciwwskazaniem do stosowania.
- Każde poważne działanie niepożądane, które wystąpiło w związku ze stosowaniem wyrobu medycznego należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego (www.urpl.gov.pl).

Skład:

Aqua, Alcohol Denat., Diethyl Phtalate, T-Butyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Sodium Sulfate, Parfum¹, CI 42090

Warunki użytkowania, przechowywania, transportu i usuwania:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5-25 °C, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie używać po upływie terminu ważności.

Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy, a następnie zutylizować.

Produkt można usunąć przez rozcieńczenie wodą i spłukanie.

Opakowanie:

Tuba 75 g

Wytwórca:









ALPA, a.s.
Hornoměstská 378
594 01 Velké Meziříčí
Republika Czeska
www.alpa.cz

Dystrybutor:

Alpa Dystrybucja
33–112 Tarnowiec
ul. Akacjowa 5
Polska



Objaśnienie użytych symboli:

	Wytwórca		Przeczytaj instrukcję stosowania
	Numer serii produkcyjnej		Data ważności
	Chronić przed światłem słonecznym		Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy
	Zakres temperatury podczas przechowywania i transportu		Wyrób medyczny

Instrukcja użytkowania, rev. 3.1, data 12.01.2026

¹ Parfum: Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, Eugenol, Eucalyptus Globulus Oil, Linalool, Citral, Pinene, Limonene, Anethole, Beta-Caryophyllene, Camphor, Linalyl Acetate, Alpha-Terpinene, Benzaldehyde, Benzyl Benzoate, Carvone, Cinnamomum Cassia Leaf Oil, Citronellol, Citrus Aurantium Peel Oil, Coumarin, Eugenyl Acetate, Geraniol, Geranyl Acetate, Isoeugenol, Lavandula Oil/Extract, Terpeneol, Terpinolene, Turpentine