

Návod k použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel hřebíček, 75 g

Před použitím zdravotnického prostředku ALPA Active gel hřebíček si pečlivě prostudujte tento návod.

Poznámky:

- Návod k použití ALPA Active gel hřebíček by měl být považován za součást zdravotnického prostředku.
- Tento návod k použití by měl být uchováván po celou dobu použitelnosti zdravotnického prostředku ALPA Active gel hřebíček.

Popis zdravotnického prostředku / účel použití:

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel hřebíček je určen k léčbě a zmírnění bolesti zad, neuralgie a bolesti při degenerativním onemocnění kloubů. Včasná masáž s využitím zdravotnického prostředku ALPA Active gel hřebíček může také zabránit zhoršení symptomů.

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel hřebíček je určen pro širokou škálu uživatelů bez jakýchkoliv zvláštních omezení, pokud jde o délku používání.

Popis mechanismu účinku ALPA Active gel hřebíček, vlastností z hlediska účinnosti a očekávané klinické přínosy:

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel hřebíček má vhodné kluzné vlastnosti díky své viskozitě a hustotě.

Tyto parametry zajišťují optimální přenos sil při masáži a zajišťují její vysokou účinnost. Díky tomu je docíleno snížení bolesti.

Viskozita a hustota zdravotnického prostředku ALPA Active gel hřebíček jsou vhodně zvoleny podle typu, plochy a požadovaného minimálního času masáže bolestivého místa. Masáž by měla být prováděna až do prvních známek absorpce a vymizení gelu.

Masáž prováděná se zdravotnickým prostředkem ALPA Active gel hřebíček také zajišťuje účinek myorelaxace, která také snižuje bolest páteře a zad.

Fyzikální vlastnosti ALPA Active gel hřebíček zabezpečují terapeutický účinek. Gel obsahuje základní látky na bázi vody, lihu, mentolu, ricinového oleje, gelotvorné přísady a extraktu hřebíčku. Jeho unikátní chemické složení stanovuje viskozitu a hustotu gelu a zajišťuje tak dostatečný skluz při masáži. Obsah hřebíčku také poskytuje další efekt v podobě příjemné a uvolňující vůně.

Způsob použití:

Gel je určen k zevnímu použití. Podle potřeby naneste na dlaň vhodné množství gelu vzhledem k velikosti masírovaného povrchu.

Vmasírujte gel do prvních příznaků absorpce, několikrát denně. Je vhodnější provádět masáž střídavě s kruhovými a vratnými pohyby.

Po vymizení symptomů lze gel používat ještě po několik dní.

POZNÁMKA; použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel hřebíček chrání pokožku před oděrem a jinými poškozeními, které mohou vzniknout při masáži bez použití kluzných látek.

Kontraindikace:

- Alergie na některou z obsažených složek.
- Neaplikujte na rány a poškozenou kůži.
- Nevhodné pro děti do 3 let.

Upozornění:

- Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě vzniku jakýchkoli komplikací se poradte s ošetřujícím lékařem.
- Neaplikujte na oči a sliznice.
- Nepoužívat v případě poškození plomby na tubě.
- Při použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel hřebíček nebyly popsány nežádoucí žádné vedlejší účinky typu alergií, zvýšení bolestivosti atp. Lehké kožní podráždění (svědění) u přecitlivělých osob není na závalu.
- Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu (www.sukl.cz).

Složení:

29 % Alcohol Denat., 1,5 % Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, 1 % Lubrajel Oil (Glycerin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Propylene Glycol, PVM/MA Copolymer), 0,5 % Menthol, 0,7 % Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 0,2 % Camphor, Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Dimethyl Isosorbide, Mannitol, Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Tocopheryl Acetate, Retynil Palmitate, Triethanolamine, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Eugenol, Cinnamal, Citral, d-Limonene, Linalool, Geraniol, CI 42090, CI 77891, CI 77491.

Podmínky použití, skladování, dopravy a likvidace:

Skladujte v suchu, při teplotě 5–25 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Po otevření spotřebujte do 12 měsíců, poté zlikvidujte.

Výrobek je možné zlikvidovat naředěním vodou a spláchnutím do odpadu.

Balení:

Tuba 75 g

Výrobce:

ALPA, a.s.









Hornoměstská 378

594 01 Velké Meziříčí

Česká republika

www.alpa.cz

Vysvětlení použitých symbolů:

	Výrobce		Čtěte návod k použití
	Číslo výrobní dávky		Datum expirace
	Chránit před slunečním zářením		Po otevření použijte do 12 měsíců
	Omezení teploty při skladování a přepravě		Zdravotnický prostředek

Návod k použití, rev. 3.0, datum: 25.05.2021