

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego
NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, 
żel z ekstraktem goździka korzennego, 75 g

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego

Uwagi:

- Instrukcję stosowania NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego należy traktować jako część wyrobu medycznego.
- Niniejsza instrukcja stosowania powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego.

Opis wyrobu medycznego / wskazania do stosowania:

Wyrób medyczny NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego jest przeznaczony do leczenia, łagodzenia między innymi: bólów kręgosłupa, neuralgii oraz bólów w trakcie schorzeń zwyrodnieniowych stawów. Wczesny masaż wyrobem medycznym NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego może zapobiec nasileniu objawów.

Wyrób medyczny NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego jest przeznaczony dla szerokiego kręgu użytkowników bez specjalnych ograniczeń również co do długości czasu stosowania.

Opis mechanizmu działania NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego, właściwości pod względem skuteczności i oczekiwanych korzyści klinicznych:

Wyrób medyczny NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego posiada odpowiednie właści-

wości poslizgowe ze względu na swoją lepkość i gęstość. Te parametry zapewniają optymalne przenoszenie sił podczas masażu i zapewniają jego wysoką skuteczność. W rezultacie następuje redukcja bólu. Lepkość i gęstość wyrobu medycznego NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego są odpowiednio dobrane do rodzaju, obszaru i minimalnego czasu masażu bolącego miejsca. Masaż należy wykonywać, aż do pojawienia się pierwszych oznak wchłaniania i zaniku żelu. Masaż wykonywany z użyciem wyrobu medycznego NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego zapewnia dodatkowo efekt miorelaksacji, powodując również zmniejszenie bólu kręgosłupa i pleców.

Efekt terapeutyczny NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego zapewniają jego właściwości fizyczne. Główne składniki żelu to: woda, alkohol, mentol, olej rycynowy, substancje żelujące i ekstrakt z goździka.

Jego unikalny skład chemiczny decyduje o lepkości i gęstości żelu, a tym samym zapewnia wystarczający poslizg podczas masażu. Zawartość goździka zapewnia również dodatkowy efekt w postaci przyjemnego i relaksującego zapachu.

Sposób użycia:

Żel przeznaczony jest do użyciu zewnętrznego. W razie potrzeby nanieść odpowiednią ilość żelu na dłoń, w zależności od wielkości masowanej powierzchni. Masaż należy wykonywać do pierwszych oznak wchłaniania żelu, kilka razy dziennie. Masaż najlepiej jest wykonywać naprzemiennie ruchami okrężnymi i posuwisto-zwrotnymi. Po ustąpieniu objawów żel można stosować jeszcze przez kilka dni.

UWAGA: stosowanie wyrobu medycznego NEURO TERAPIA żel NES PHARMA®, żel z ekstraktem goździka korzennego chroni skórę przed otarciami i innymi uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas masażu bez użycia środka poslizgowego.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia:

- Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku jakichkolwiek komplikacji należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na błony śluzowe i do oczu.
- Nie używać, jeśli plomba na tubie jest uszkodzona.
- Podczas stosowania **NEURO TERAPIA** żel **NES PHARMA**®, żel z ekstraktem goździka korzennego nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych, takich jak: uczulenia, zwiększenie bolesności, itp. Lekkie podrażnienie skóry (swędzenie) u osób nadwrażliwych nie jest przeciwwskazaniem do stosowania.
- Każde poważne działanie niepożądane, które wystąpiło w związku ze stosowaniem wyrobu medycznego należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego (www.urpl.gov.pl).

Skład:

29 % Alcohol Denat., 1,5 % Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, 1 % Lubrajel Oil (Glycerin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Propylene Glycol, PVM/MA Copolymer), 0,5 % Menthol, 0,7 % Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 0,2 % Camphor, Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Dimethyl Isosorbide, Mannitol, Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Triethanolamine, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Eugenol, Cinnamal, Citral, d-Limonene, Linalool, Geraniol, CI 42090, CI 77891, CI 77491.

Warunki użytkowania, przechowywania, transportu i usuwania:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5-25 °C, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie używać po upływie terminu ważności.

Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy, a następnie zutylizować.

Produkt można usunąć przez rozcieńczenie wodą i splukanie.

Opakowanie:

Tuba 75 g









Wytwórca:

ALPA, a.s.
Hornoměstská 378
594 01 Velké Meziříčí
Republika Czeska
www.alpa.cz

Dystrybutor:

Alpa Dystrybucja
33-112 Tarnowiec
ul. Akacjowa 5
Polska

Objaśnienie użytych symboli:

	Wytwórca		Przeczytaj instrukcję stosowania
	Numer serii produkcyjnej		Data ważności
	Chronić przed światłem słonecznym		Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy
	Zakres temperatur podczas przechowywania i transportu		Wyrób medyczny

Instrukcja użytkowania, rev. 3.0, data 25.05.2021